

## KARTA GWARANCYJNA

Model: .....

Numer Seryjny: .....

Pieczęć punktu sprzedaży

i czytelny podpis Sprzedawcy: .....

1) Firma ANTAR Sp.J. 03-068 Warszawa, ul. Zawisłańska 43 udziela niniejszym 12 miesięcznej gwarancji na wózek inwalidzki od daty wydania wózka kupującemu. Dla wyrobów, których zakup był refundowany przez NFZ obowiązuje przedłużony okres gwarancji równy połowie okresu użytkowania określonego w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, pod warunkiem, że okres użytkowania został w rozporządzeniu określony w miesiącach lub w latach.

2) W okresie gwarancji ANTAR zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia zestawu do prawidłowego funkcjonowania w terminie 14 dni od daty otrzymania przez serwis reklamowanego towaru, wraz z dokumentem zakupu oraz kartą gwarancyjną.

3) ANTAR zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną. Naprawa lub wymiana uszkodzonego produktu nie przedłuża okresu gwarancji.

4) W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezzwłocznie wysłać na adres firmy ANTAR (podany w punkcie 1) lub skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.

5) Przed rozpoczęciem eksploatacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi i ściśle jej przestrzegać. Eksploatacja wyrobu niezgodnie w przeznaczeniu i zaleceniami powoduje nieodwracalną utratę gwarancji.

6) Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek przebiccia lub przecięcia wyrobu ostrym przedmiotem, uszkodzenia na skutek działania zewnętrznych sił mechanicznych, nacisku przekraczającego maksymalną dopuszczalną wagę użytkownika opisaną w instrukcji obsługi, zetknięcia wyrobu ze spirytusem, substancjami tłustymi lub olejnymi, benzyną. Gwarancją nie są objęte elementy podlegające normalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji, jak np. opony, tkaniny miękkie, podłokietniki, łożyska, elementy gumowe i inne.

7) Wyrób przesłany do serwisu w ramach reklamacji nie może stwarzać zagrożenia epidemiologicznego.

8) NINIEJSZY DOKUMENT GWARANCJI JEST WAŻNY WYŁĄCZNIE WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU (PARAGONEM, RACHUNKIEM, FAKTURĄ). PROSIMY O DOŁĄCZANIE DOWODU ZAKUPU W PRZYPADKU SKŁADANIA KAŻDEJ REKLAMACJI. W CELU UZNANIA PRZEDŁUŻONEGO OKRESU GWARANCJI DLA WYROBÓW, KTÓRYCH ZAKUP BYŁ REFUNDOWANY PRZEZ NFZ, KONIECZNE JEST DOŁĄCZANIE KOPII „ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKI POMOCNICZE”.

9) Reklamacje złożone bez dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej z wpisanym numerem serii produktu nie będą uwzględniane.

## Balkonik – instrukcja użytkownika.

**Modele: AT02001; AT02002; At02003**



Balkoniki są lekkimi, wygodnymi w użytkowaniu wyrobami, przeznaczonymi do pomocy w przemieszczaniu się osobom o ograniczonych zdolnościach ruchowych. Zapewniają użytkownikowi podparcie, zmniejszając ryzyko przewrócenia się użytkownika, a także umożliwiają mu chodzenie z zachowaniem podparcia z obu stron. Maksymalna waga użytkownika wynosi 150 kg.

#### MODELE:

W zależności od potrzeb oraz preferencji użytkownika możliwy jest wybór jednej z 3 wersji balkoników:

**AT02001** – wersja z 4 kołami obrotowymi. Wyrób pozwala na szybkie przemieszczanie się użytkownika we wszystkich kierunkach, a w razie potrzeby możliwe jest zablokowanie balkonika przez włączenie hamulców. Model ten polecany jest dla osób o dużej mobilności, nie mających problemów z równowagą.


**AT02002** – wersja z 2 kołami, krocząca. Umożliwia przesunięcie balkonika bez konieczności podnoszenia go.

**AT02003** – wersja z 4 stopkami, przestawna, krocząca. Zapewnia największą stabilność. W celu przestawienia balkonika niezbędne jest podniesienie go całego (gdy jest zablokowany) lub jego boku – gdy balkonik jest w opcji przestawnej. Zalecana jest głównie do przemieszczania się na krótkich odcinkach.

#### OSTRZEŻENIA:

- 1) Nie używać modelu AT02001 w przypadku osób mających zaburzenia równowagi. Może to doprowadzić do przewrócenia się użytkownika.
- 2) Nie wychylać się poza obręb balkonika. Grozi to przewróceniem się użytkownika.
- 3) Nie bujać balkonikiem. Grozi to przewróceniem się użytkownika.
- 4) Jeżeli balkonik jest czterokołowy (AT02001), jeżeli w danym momencie nie jest użytkowany – należy włączyć jego hamulce.
- 5) Nie stosować, jeżeli waga użytkownika przekracza 150 kg.
- 6) Należy unikać kontaktu z otwartym ogniem. Wyrób może się zapalić.
- 7) Należy upewnić się, że po zamontowaniu stalowy bolec klipsa mocującego stopki lub kółka przechodzi przez otwór po obu stronach ścianki. W przeciwnym wypadku wyrób może nie być stabilny, a otwór może ulec odkształceniu. Również bolec zmieniający balkonik z kroczącego w stały powinien przechodzić przez otwór po obu stronach ścianki.
- 8) Nie należy używać balkonika 4-kołowego (AT02001) w opcji kroczącej. Powinien on być zawsze w opcji stałej. Balkonik rozkłada się poprzez złapanie za jego boki i rozchylenie ich. Po rozłożeniu balkonika przycisk zatrasku w górnej, centralnej części balkonika powinien znaleźć się w otworze i zablokować balkonik w pozycji rozłożonej.


#### PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA:

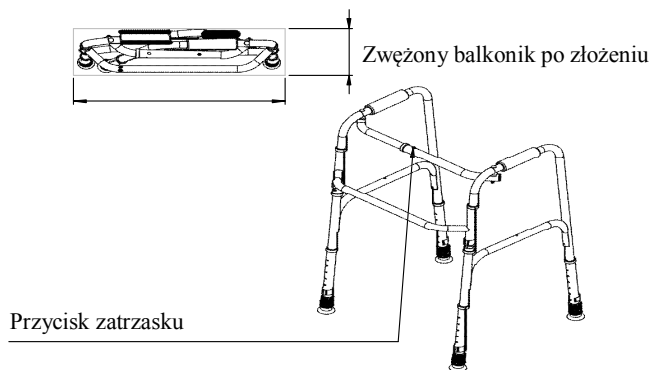

Aby złożyć balkonik należy wcisnąć przycisk zatrasku i pociągnąć boki balkonika do środka, a następnie złożyć balkonik.

Balkonik może być używany w opcji stałej lub kroczącej. Opcja krocząca oznacza, iż boki balkonika przesuwają się w stosunku do siebie nawzajem umożliwiając przestawianie balkonika do przodu przez podnoszenie tylko jednego boku. W opcji stałej balkonik staje się sztywny. Można go przemieszczać przez podnoszenie całego balkonika i przesunięcie go do przodu.

W celu przestawienia balkonika z opcji kroczącej na opcję stałą należy wyjąć klipsy znajdujące się na bokach balkonika i zamontować je w odpowiednich otworach w części przedniej. Balkonik w modelach AT02002 oraz AT02003 w opcji stałej nie może zostać złożony. Aby go złożyć należy przestawić go w opcję kroczącą.

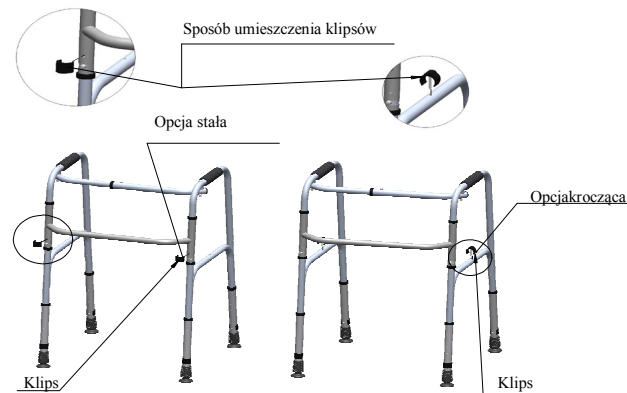

Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu należy wyregulować jego wysokość. W tym celu należy wyjąć klips, wyregulować wysokość – jednakową dla wszystkich czterech nóg, a następnie wsunąć klips w odpowiedni otwór. **NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE STALOWY BOLEC PRZECHODZI PRZEZ OTWÓR PO OBU STRONACH ŚCIANKI.** W przeciwnym wypadku wyrób może nie być stabilny, a otwór może ulec odkształceniu.



#### PORUSZANIE SIĘ Z BALKONIKIEM

AT02001 – Balkonik przesuwany w dowolną stronę poprzez popychanie go. JEŻELI W DANYM MOMENCIE UŻYTKOWNIK NIE UŻYWA WYROBU NALEŻY WŁĄCZYĆ HAMULCE.

AT02002 – Balkonik przesuwa się do przodu poprzez uniesienie jego tyłu, popchnięcie i postawienie części tylnej na ziemi.

AT02003 – Balkonik przestawia się poprzez uniesienie go i postawienie nieco z przodu, a w opcji kroczącej poprzez podniesienie 1 boku balkonika i popchnięcie go do przodu.

#### KONSERWACJA WYROBU

Wyrób należy okresowo wyczyścić za pomocą wody i środków czystościowych. Wyrób może być poddawany działaniu środków dezynfekujących. Nieużywany wyrób powinien być przechowywany w suchym pomieszczeniu. Unikać długotrwałej ekspozycji na bezpośrednie światło słoneczne.

#### UTYLIZACJA ZUŻYTEGO WYROBU

Po wycofaniu z użytkowania wyrób może być traktowany jako odpad komunalny. Zaleca się segregację podczas utylizacji po wycofaniu wyrobu z eksploatacji.



Wytwórca:  
ANTAR Sp. J.  
03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43  
Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30  
www.antar.net

