

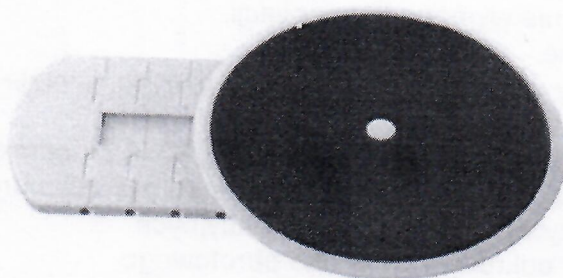


mediQual

# Instrukcja obsługi

## Dysk transferowy Kod towaru: 750/14

Producent:

**DIETZ**  
REHA-PRODUKTE

Model:	Wymiary:	Dopuszczalne obciążenie
Dietz Art.-Nr. 750/14 Artykuł: 900100	Średnica: 320 mm Długość elem. przesuwnego: 411 mm Szerokość elem. Przesuwnego: 180 mm	140 kg
Waga:	Materiał:	Wyrób zgodny
1,3 kg	POM/PP/PU	Dyrektywa MDD 93/42/EEC

1. Nakładka przeznaczona jest do stosowania na podnośniku wannowym. Ułatwia obrót i przemieszczanie osób z ograniczoną mobilnością z brzegu wanny na siedzisko podnośnika.
2. Nakładka składa się z surowców wtórnych.
3. Nakładka przeznaczona jest do wielokrotnego użycia.
4. Instrukcje bezpieczeństwa:
  - nie należy przeciążać nakładki, dopuszczalne obciążenie: 140 kg
  - obciążony powinien być środek obrotowego siedziska, nie należy obciążać jego krawędzi
  - należy sprawdzić stan podkładki po każdym użyciu, nie należy używać uszkodzonego produktu
  - w przypadku osoby z mocno ograniczoną mobilnością, podkładki należy używać z osobą asystującą
5. Etykieta umieszczona jest na spodniej części podkładki
6. Użytkowanie:
  - nie stosować żadnych olejów lub substancji mydlanych na gumowe podkładki antypoślizgowe
  - nie chwycić rękami podkładki pod obrotowym siedziskiem w chwili obrotu-ryzyko uszkodzenia palców
  - gdy używasz jako płyty transferowej, trzymaj nieruchomą pozycję i unikaj nadmiernych ruchów ciała

7. Transfer i obrót:
  - 1) Ustaw podnośnik wannowy w górnej odpowiedniej pozycji
  - 2) Połóż nakładkę na siedzisko podnośnika tak, by obrotowe siedzisko w końcowej pozycji znajdowało się na środku siedziska podnośnika
  - 3) Przesuń obrotowe siedzisko na brzeg wanny
  - 4) Usiądź na obrotowym siedzisku
  - 5) Razem z obrotowym siedziskiem przesunij się na siedzisko podnośnika
  - 6) Podnieś i obróć nogi umieszczając je w wannie
  - 7) Opuść podnośnik
  - 8) Aby wyjść wanny, przesunij obrotowe siedzisko na brzeg, podnieś i obróć nogi wyjmując je z wanny
8. Konserwacja  
Podkładka nie wymaga konserwacji.
9. Czyszczenie
  - nie należy używać środków do szorowania, istnieje ryzyko uszkodzenia elementów z tworzywa
  - produkt może być czyszczony letnią wodą z dodatkiem środka myjącego
  - pokrowiec obrotowego siedziska może być zdemontowany i prany w temp. 40°C
  - można używać środków dezynfekcyjnych
10. Demontaż pokrowca siedziska obrotowego
  - wyjąć zatyczkę znajdującą się na środku siedziska
  - pociągnąć pokrowiec wzdłuż krawędzi
11. Montaż pokrowca siedziska obrotowego
  - położyć i wyrównać pokrowiec na siedzisku obrotowym
  - wcisnąć krawędzie pokrowca do zagłębień w siedzisku
  - zapiąć pokrowiec za pomocą zatyczki

Dystrybutor:  
MEDIQUAL SP. Z O.O.  
ul. F. Ossendowskiego 4  
93-228 Łódź

#### **INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI**

1. Dokument gwarancyjny: faktura sprzedaży
2. Okres gwarancji: 36 miesięcy
3. Reklamacje należy zgłaszać: w BOK MediQual Sp. z o.o.
4. Naprawy realizowane są przez: MediQual Sp. z o.o.

Kontakt:

**mediQual**

tel. +48 42 209 49 04  
fax. +48 42 209 34 46

[bok@mediqua1.pl](mailto:bok@mediqua1.pl)  
[www.mediqua1.pl](http://www.mediqua1.pl)