

SPOSÓB UŻYCIA


1. Napompuj miskę za pomocą ust lub pompki. Miska wyposażona jest w wentyl zapobiegający cofaniu się powietrza. Zbyt duże ciśnienie powietrza wewnątrz miski może spowodować rozerwanie powłoki.
UWAGA: DO POMPOWANIA MISKI NIE WOLNO UŻYWAĆ KOMPRESORÓW !!!
2. Umieść wąż odpływowy miski w naczyniu, które będzie zbierać wodę. Naczynie powinno znajdować się poniżej poziomu miski tak, aby woda mogła swobodnie odpływać.
Uwaga: z miski przez korek spustowy może wypływać nieznaczna ilość wody, dlatego też należy się upewnić, że wąż odpływowy jest włożony do szczelnego naczynia.
3. Podłóż miskę pod głowę pacjenta, tak aby jego szyja znalazła się w wycięciu miski.
4. Włóż rurkę usztywniającą w górną część zbiornika na wodę i przewlecz przez nią sznurek, tak aby można było powiesić prysznic. Uzupelnij prysznic ciepłą wodą, a następnie powieś go powyżej poziomu miski. Aby z prysznica zaczęła lecieć woda należy przekręcić zawór.*
5. Po umyciu głowy pacjenta odblokuj zawór upustowy w misce, aby woda mogła wylać się przez wąż odpływowy do naczynia.
6. Kiedy woda odpłynie, wyciągnij miskę pneumatyczną spod głowy pacjenta, kładąc w to miejsce ręcznik. Wysusz głowę pacjenta.
7. Wylej pozostałą wodę z miski i prysznica, a następnie wytrzyj je bawełnianą szmatką do sucha.

* Dotyczy tylko zestawu z prysznicem. Prysznic jest opcją zamawianą oddzielnie. Upewnij się, że zamówiłeś opcję z prysznicem.

NAPRAWA

Do miski dołączony jest zestaw naprawczy. Aby naprawić miejsce naruszenia powierzchni miski postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1. Upewnij się, że miska jest napompowana.
2. Włóż miskę pod wodę, aby zlokalizować miejsce przecieku powietrza.
3. Zaznacz miejsce przecieku.
4. Wytrzyj miskę i usuń z niej powietrze.
5. Wyczyść i wysusz dokładnie miejsce przecieku.
6. Nanieś cienką warstwę kleju na obie sklepane powierzchnie (miskę i łatę), przyklej ją tak, aby przeciek znalazł się na jej środku i dociśnij na ok. 30 minut do momentu złapania kleju.
7. Odstaw miskę na co najmniej 2 godziny, aby klej mógł swobodnie wyschnąć.
8. Przygotuj miskę do użycia zgodnie z instrukcją sposobu użycia.

 **UWAGA!** Dołączonego zestawu naprawczego można użyć dopiero po upływie okresu gwarancyjnego. Naprawianie miski samodzielnie bez zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego serwisu powoduje natychmiastową utratę praw gwarancyjnych.

GWARANCJA

Sprzęt objęty jest 12-miesięcznym okresem gwarancji. Sprzęt powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania. Gwarancja nie obejmuje: czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem i regulacją opisaną w instrukcji, części ulegających zużyciu podczas normalnego użytkowania, mechanicznych i termicznych uszkodzeń sprzętu, usterek powstałych wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbań, dokonywania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych. Do serwisu produkt należy dostarczyć czysty. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia, Nabywca będzie obciążony kosztami realizacji reklamacji. Gwarancja jest realizowana na podstawie dowodu zakupu. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

WYTWÓRCA:

REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14,
03-310 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 594 03 00,
fax.: +48 22 594 03 07
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl



Wydano: 04/2014